

ReNew™ Secadora y Ambientador

(Secador de Audífonos y Probador de Baterías)

Guía de Funcionamiento



Modelo
DB-100

Gracias por su compra de su ReNew Secadora y Ambientador; Lea cuidadosamente esta guía del usuario antes de usarla y guárdela para futuras consultas.

Línea gratuita de ayuda: 866.376.9271 (8 AM-5PM PST, M-F)

Instrucciones de seguridad importantes:

Advertencia - Cuando utilice aparatos eléctricos, siempre se deben tomar las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.
2. Para reducir el riesgo de lesiones, se necesita supervisión cercana cuando se utiliza un aparato cerca de niños.
3. No mire directamente las dos luces UV situadas en las esquinas delanteras de la cámara de secado.
4. Utilice únicamente accesorios recomendados o vendidos por el fabricante.
5. No lo use al aire libre. No lo use cerca del agua.
6. Para desconectar, gire todos los controles a la posición off (apagado), luego retire el enchufe del tomacorriente.
7. No desenchufe tirando del cable. Para desconectar, agarre el enchufe, no el cable.
8. Desconecte del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de realizar el mantenimiento o la limpieza.
9. No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado, o después de que el aparato funcione mal o se caiga o se dañe de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
10. No coloque la bandeja interior extraíble en el lavavajillas.

Instrucciones de Seguridad Importantes (continuación):


Eliminación de las baterías:

Deseche las baterías adecuadamente, siguiendo las regulaciones locales. **NO** deseche las baterías del sistema en la basura doméstica. **NO** incinerar. Lleve el equipo a un centro de reciclaje cercano.




Contenidos del paquete:

Su modelo CA-PX Receptor Personal Vibratorio Inalámbrico es empaquetado con todos los artículos mostrados. Si algo falta, póngase en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente.

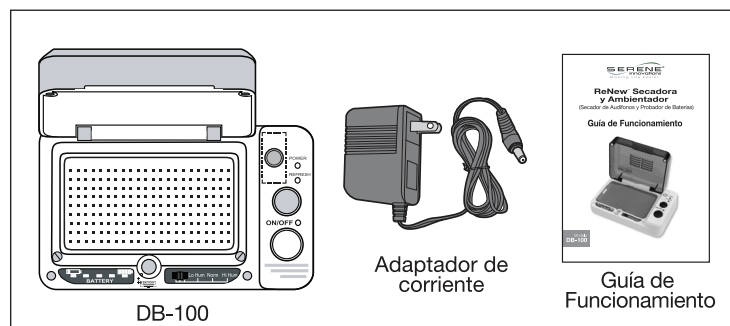

Identificación de la característica:

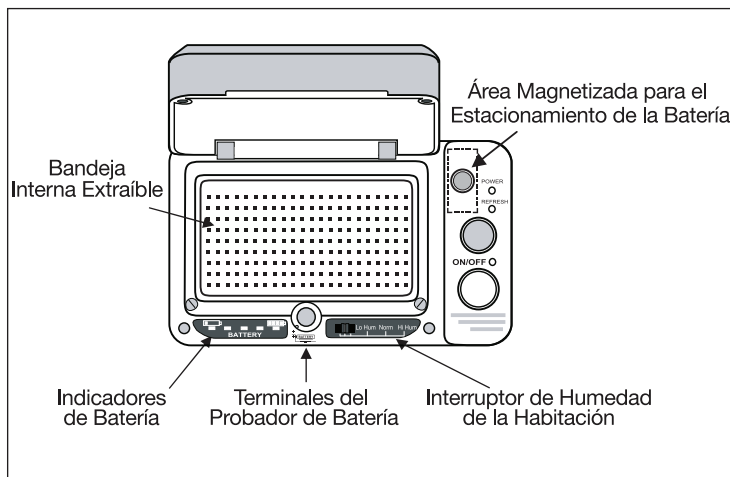

Ciclo de Secado:

1. Enchufe el adaptador de CA en la unidad y en la toma de corriente. Compruebe que el indicador de alimentación está encendido.
2. Ajuste el interruptor de humedad de la habitación para los siguientes tiempos de secado:
 "Humedad Baja" = 2 hrs.
 "Humedad Normal" = 4 hrs.
 "Humedad Alta" = 8 hrs.
3. Abra la cubierta de la batería del audífono para exponer la batería para el secado también. Coloque los audífonos en la cámara y cierre la cubierta. O, puede quitar la batería y mantenerla en el área de estacionamiento magnético. Vuelva a instalar la batería después de completar el ciclo de secado.

Ciclo de Secado: (continuación):

- 4. Presione el botón **ON / OFF** para iniciar el tiempo de secado seleccionado. Presione el botón **REFRESH** para activar la luz UV durante una hora (opcional).

Precaución: No mire directamente las dos luces UV en las esquinas delanteras de la cámara.

- 5. Quite los audífonos y limpie cualquier cera seca.
- 6. Para limpiar la bandeja interior extraíble y limpiar con un paño húmedo. Seque la bandeja y reemplácela cuidadosamente en el DB-100. No coloque la bandeja interior extraíble en el lavavajillas.

Prueba de la Batería:

- 1. Coloque una batería contra los terminales del comprobador de baterías. Asegúrese de que el contacto de la batería redonda más pequeña (-) se coloca en el disco de oro.
- 2. Presione la batería de modo que su cuerpo (+) esté presionado contra el terminal de oro vertical.
- 3. La capacidad de la batería se indica por el número de indicadores que se encienden. 4 o 5 indicadores significa que la batería tiene buena capacidad restante. 1 o 2 indicadores significa que la batería tiene capacidad marginal y debería ser reemplazada pronto.
- 4. Antes de probar una batería nueva, retire la lengüeta de la batería y espere dos minutos para que se estabilice el voltaje de la batería.

ReNew Especificaciones de Ambiente a 25 C:

- 1. Temperatura de la Cámara (medida a 5 mm por encima del centro)..... 45 +/- 5 C
- 2. Luz UV (Tiempo max.= 1 hora).....400 nm;<100mw
- 3. Temporizador de Ciclo de Secado.....2 hr, 4hr, 8hr
- 4. Evaporación de la Humedad.....Evaporar 18 mm de (Probado con agua en un tubo de plástico de 2 mm de diámetro) agua después de 4 horas de secando a 60% R.H.
- 5. Indicadores de Voltaje de la Batería.....5
- 6. Conmutación de la Entrada del Adaptador de CA.....100 to 240 VAC, 50/60 Hz
- 7. Conmutación de la Salida del Adaptador de CA.....12 VDC,1000MA
- 8. Control de Sobre Temperatura Redundante.....PTC y Termostato
- 9. Temperatura de Funcionamiento.....0 to 40 C
- 10. Temperatura de Almacenamiento.....-10 to 50 C
- 11. Tamaño (mm).....148 x 89 x 51 (5.8"x3.5"x2")
- 12. Peso (gm).....430 (15 Oz)

Información de Servicio de Garantía:

Su Aspirador **ReNew Secadora y Ambientador** viene con un año de garantía limitada. Garantizamos durante este período de garantía a partir de la fecha de compra al consumidor original que estos productos estarán libres de defectos en materiales y mano de obra bajo el uso doméstico previsto. En el caso que estos productos no funcionen adecuadamente en el plazo de un año de compra por defectos de materiales o mano de obra, devuelva la unidad (Flete Prepago) con comprobante de compra (recibo de compra o comprobante de empaque, sin excepciones) a Serene Innovations, Inc.. Serene Innovations, Inc. reparará o reemplazará la unidad (con una unidad reformada o unidad de igual condición) y regresará la unidad (Utilizando el envío terrestre de UPS / USPS) sin costo para usted (nomás habrá una carga de envío adicional nominal si se envía afuera de los 48 Estados Unidos Continentales).

Esta garantía no se aplica a ningún producto que haya sido accidentalmente dañado debido a: abuso, mal uso, negligencia, uso en frecuencia eléctrica o voltaje que no esté marcado en el producto y/o descrito en este manual. Los defectos o errores causados por alteraciones, reparaciones y/o manipulación no están cubiertos por esta garantía.

Daños Incidentales o Consecuentes:

Ni Serene Innovations, Inc., ni el minorista, distribuidor o distribuidor vendedor tiene la responsabilidad de cualquier daño incidental o consecuente, incluyendo, sin limitación, a pérdida comercial de ganancias o por cualquier gasto incidental, y pérdida de tiempo o inconvenientes. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consiguientes, por lo que la limitación o la exclusión puede no aplicarse a usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted puede tener otros derechos legales que varían de estado a estado. Si un defecto es cubierto por esta garantía contacte con un representante de atención al cliente por teléfono o visita el sitio web “www.sereneinnovations.com” para obtener un número de Mercancía de Devolución de Autorización y obtenga las instrucciones de envío antes de devolver el producto a nosotros. Cualquier envío sin una RMA no será aceptado y será devuelto a usted a su cargo.

Cualquier producto devuelto autorizado debe ir acompañado de una comprobante de compra y una breve descripción del problema. Para mantenimiento de la reparación y servicio de atención al cliente, póngase en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente para obtener instrucciones.



Serene Innovations, Inc.
14731 Carmenita Road, Norwalk, CA 90650 Toll Free: 866.376.9271
Local 562.407.5400 www.sereneinnovations.com