



Modèle SA-40

Aussi™ facile que 1,2,3

Guide de démarrage rapide

HearAll™

Amplificateur De Téléphone Cellulaire



Appairer le SA-40 avec votre téléphone cellulaire :

1. Pour effectuer l'appairage initial, activez le *Bluetooth®* de votre téléphone.
2. Allumez le SA-40. Il clignotera pendant l'appariement avec votre téléphone. Le SA-40 demeurera lié jusqu'à ce que vous l'effaciez de votre téléphone cellulaire.

Sélectionner un mode d'opération :

1. **HS** – Utiliser comme combiné.
2. **T** – Agencer à votre appareil auditif.
3. **SPKR** – Utiliser comme haut-parleur.

Répondre à un appel sur le SA-40 :

1. Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur  pour répondre.
2. Réglez le volume en appuyant les boutons **VOL (+)** ou **VOL (-)**.
3. Pour améliorer la clarté du son, ajustez la tonalité en déplaçant **TONE**, jusqu'au point où vous entendez le mieux.
4. Appuyez  pour raccrocher.

Effectuer un appel sur le SA-40 :

1. Appuyez  sur pour commencer.
2. Si votre téléphone cellulaire est équipé d'un composeur vocal, dites au SA-40 le nom ou le numéro désiré.
3. Si votre téléphone cellulaire n'a pas de composeur vocal, entrez le numéro en utilisant le clavier numérique de votre téléphone.
4. Appuyez sur  pour raccrocher.

Veillez noter :

Le SA-40 amplifie la voix de votre interlocuteur jusqu'à 100 fois plus forte que sur votre téléphone cellulaire. Faites preuve de précaution lors du réglage du volume. Le SA-40 devrait toujours être en mode combiné (HS) lorsqu'il est appuyé contre l'oreille.

Besoin d'aide? Appelez le service d'aide au numéro sans frais
866-376-9271 (9 h à 17 h HNP, lun-ven)



Serene Innovations, Inc.
14731 Carmenita Road, Norwalk, CA 90650
www.sereneinnovations.com

**Bluetooth®* est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.